

Newgene Covid-19 Antigen-Nachweis-Kit-Nasenabstrich


Allgemeines

- die verpackten Tests kühl, frostfrei und trocken lagern
- die Tests nur bei Raumtemperatur benutzen
- die Tests können in separaten Müllbeuteln im Hausmüll entsorgt werden


Durchführung

1. Verpackung des Probenahme-Tupfers öffnen, dabei die Tupferspitze nicht berühren.


2. Nun mit dem Tupfer eine Probe aus dem vorderen Nasenbereich entnehmen:
dafür das Stäbchen **2-3 Zentimeter** tief in die Nase einführen und dabei **für 20 Sekunden** mit leichten Drehbewegungen abstreichen. Derselbe Ablauf wird in der anderen Nasenhöhle wiederholt.

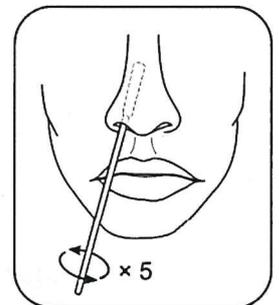


3. Tupfer in das Probenextraktionsröhrchen schieben und diesen in der Lösung **5-mal** umrühren.

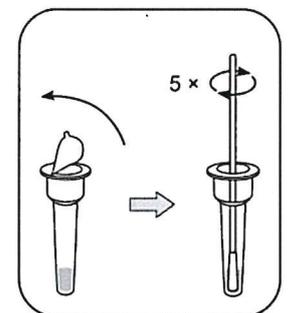


4. Röhrchen mit den Fingern zusammendrücken und gemeinsam mit Tupfer 3-mal auf und abstreifen um die Probelösung aus dem Tupfer zu entfernen. Tupfer entnehmen.

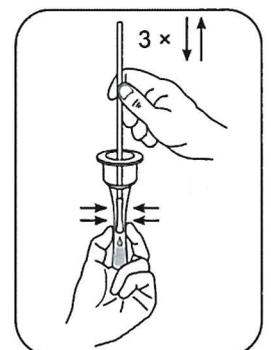

5. Das Extraktionsröhrchen mit der Kappe verschließen und **3-mal** sanft zusammendrücken. Röhrchen **1 Minute ruhen** lassen.

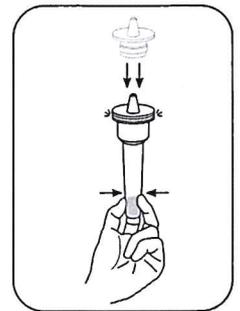


6. Auf die Testkarte **3 Tropfen** aus dem Extraktionsröhrchen vertikal auf die Probenvertiefung „S“ geben und Timer starten.

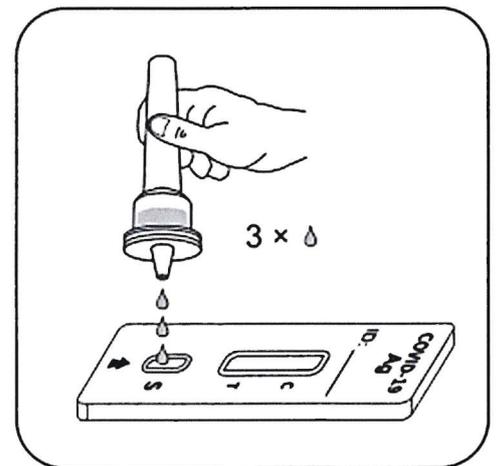


Ergebnis

- **nach 15 Minuten** das Testergebnis ablesen und interpretieren
- das Testergebnis nicht später als 30 Minuten ablesen

positiv

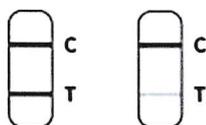

negativ

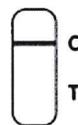

ungültig

